

# NECCHI N5004

Gentile Cliente,

La ringraziamo anzitutto per la Sua preferenza e ci congratuliamo con Lei per aver scelto il Sistema per Aerosolterapia ad ultrasuoni Necchi N5004, un apparecchio semplice da usare ed estremamente affidabile.

Le ricordiamo che nella vasta gamma di prodotti "NECCHI" Lei potrà sempre trovare:


- Sistemi per aerosolterapia con compressore a pistone o ad ultrasuoni.
- Misuratori di pressione da braccio o da polso automatici.
- Termometri digitali ascellari o auricolari.
- Umidificatori da ambiente a ultrasuoni.

## AVVERTENZE


- 1) E' un dispositivo medico CE. Legga attentamente il manuale di istruzioni e consulti il suo medico di fiducia per l'utilizzo del presente apparecchio.
- 2) Tenga l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 3) Una volta effettuato il trattamento, abbia sempre cura di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente staccando la spina dell'adattatore di corrente.

Per utilizzare correttamente e conservare a lungo nel tempo il Suo nuovo Sistema per Aerosolterapia, Le raccomandiamo di leggere con attenzione le seguenti indicazioni.

Apparecchio per Aerosolterapia ad ultrasuoni N5004

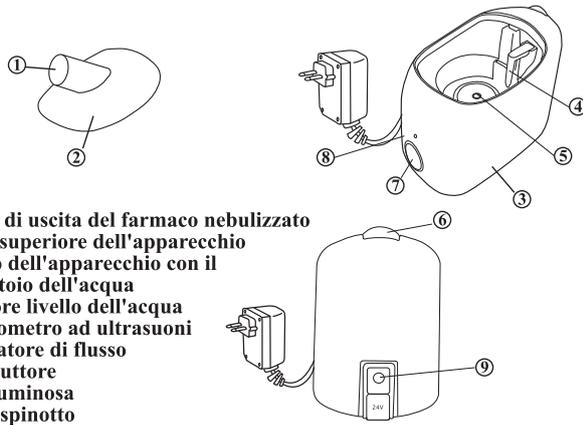

L'apparecchio è dotato dei seguenti accessori contenuti in una busta di polietilene inserita nella confezione unitamente all'apparecchio.

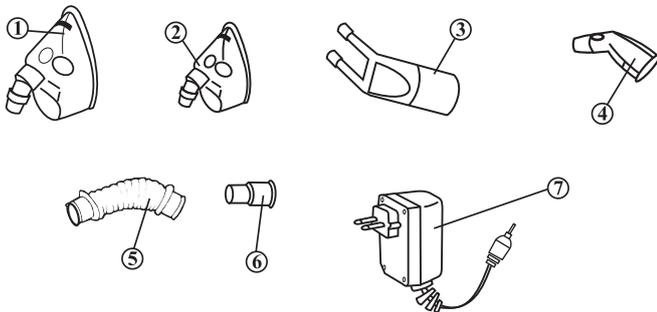







- 1-Maschera per adulti
- 2-Maschera pediatrica
- 3-Forcella nasale
- 4-Boccaglio
- 5-Tubo flessibile
- 6-Raccordo adattatore
- 7-Adattatore di corrente

## PREPARAZIONE ALL'USO DEL SISTEMA PER AEROSOLTERAPIA N5004

Dopo aver controllato che l'apparecchio ed ogni accessorio siano perfettamente puliti, proceda effettuando in successione le seguenti operazioni:

- 1 - Ponga l'apparecchio su di una superficie stabile e piana (tavolo senza tovaglia od altro rivestimento) in prossimità di una presa di corrente.
- 2 - Apra il coperchio dell'apparecchio.
- 3 - Rimuova la parte superiore come indicato nella fig. 1.
- 4 - Riempia il serbatoio di acqua fredda (possibilmente distillata), utilizzando un piccolo recipiente nel modo indicato nella fig. 2, fino al livello segnato all'interno del serbatoio, questa acqua serve per la conduzione delle onde ultrasoniche al medicinale e non viene mai nebulizzata.
- 5 - Prenda una coppetta porta medicale e versi il farmaco in essa nel modo indicato nella fig. 3.
- 6 - Collochi la coppetta con il farmaco nell'apposito spazio sotto la parte superiore dell'apparecchio (fig. 4), senza far fuoriuscire il farmaco dalla coppetta.
- 7 - Riposizionare la parte superiore al corpo dell'apparecchio, avendo cura di far combaciare perfettamente tra loro le due parti.
- 8 - Prenda il raccordo adattatore ed il tubo flessibile e li unisca; poi colleghi l'estremità libera del raccordo adattatore alla bocca di uscita del farmaco nebulizzato dall'apparecchio (fig. 5) ed applichi all'estremità libera del tubo flessibile una delle due maschere od il boccaglio o la forcella nasale, a seconda del trattamento che desidera effettuare e delle modalità con le quali desidera effettuarlo.
- 9 - Inserisca lo spinotto dell'adattatore di corrente nella presa spinotto sul retro dell'apparecchio.

A questo punto l'apparecchio è pronto per essere utilizzato e per effettuare il trattamento di Aerosolterapia.

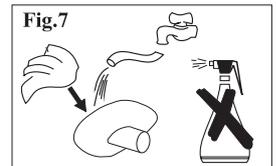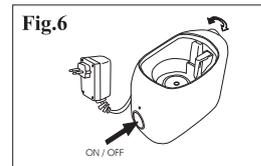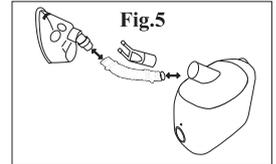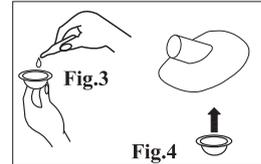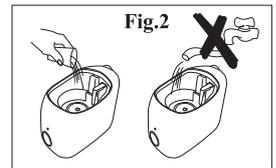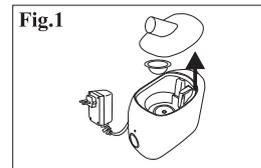

- 1 - Inserisca la spina dell'adattatore di corrente in una presa di corrente adatta (veda etichetta sul fondo dell'apparecchio).
- 2 - Prema l'interruttore sul retro dell'apparecchio: la spia luminosa sul retro dell'apparecchio si accende (luce verde) segnalando che l'apparecchio è regolarmente in funzione (fig.6).
- 3 - Inizi il trattamento mantenendo per tutta la sua durata l'apparecchio in posizione verticale, al fine di realizzare il corretto funzionamento dell'apparecchio e di ottenere la massima efficacia dalla terapia.
- 4 - Lei può regolare la velocità di nebulizzazione del farmaco ruotando la manopola del regolatore di flusso. E' consigliabile, specie nei trattamenti effettuati ai bambini, di regolare la velocità verso la posizione di "minimo" in modo da favorire il deposito del farmaco sulle pareti delle vie respiratorie.
- 5 - Continui il trattamento finchè la "nebbia" (nebulizzazione del farmaco dall'apparecchio) risulta visibile.

**Attenzione: di norma al termine del trattamento una certa quantità di farmaco resta nella coppetta; questa quantità chiamata volume residuo, non può essere nebulizzata.**

Una volta terminato il trattamento:

- 1 - Spenga premendo l'interruttore dell'apparecchio dalla parte opposta dell'accensione.
- 2 - Stacchi la spina dell'adattatore di corrente dalla presa di corrente.
- 3 - Stacchi lo spinotto dell'adattatore di corrente dalla presa spinotto sul retro dell'apparecchio.
- 4 - Stacchi l'estremità del raccordo adattatore dalla bocca di uscita del farmaco nebulizzato dall'apparecchio e la maschera (o altro accessorio precedentemente inserito) dall'estremità del tubo flessibile.
- 5 - Stacchi il raccordo adattatore del tubo flessibile.
- 6 - Rimuova la parte superiore dell'apparecchio, provvedendo a togliere la coppetta porta medicinale dal suo alloggiamento ed a svuotare il serbatoio dell'acqua in esso contenuta.
- 7 - Asciughi con la massima delicatezza il serbatoio usando un panno morbido.
- 8 - Riposizioni la parte superiore sul corpo dell'apparecchio.
- 9 - Giri verso il basso la bocca di uscita del farmaco nebulizzato, quindi rimetta il coperchio all'apparecchio.
- 10 - Effettui la pulizia della maschera (o altro accessorio precedentemente inserito) e degli altri accessori adoperati nel modo indicato nel paragrafo che segue.
- 11 - Riponga tutti gli accessori nella confezione unitamente all'apparecchio.

#### COME MANTENERE EFFICIENTE NEL TEMPO IL SUO APPARECCHIO

- 1 - Il Suo Sistema per Aerosolterapia ad ultrasuoni Necchi N5004 non ha bisogno di cure particolari, occorre soltanto che Lei:
  - eviti di farlo urtare o cadere;
  - non lo apra per nessun motivo;
  - lo tenga in un luogo adatto, evitando temperature elevate, raggi di sole diretti, umidità e polvere;
  - provveda a pulirlo (fig. 7) con un panno leggermente inumidito con acqua e detergente neutro (non utilizzi benzina, diluenti e simili), asciugandolo poi con delicatezza;
  - non immerga per nessun motivo l'apparecchio nell'acqua;
  - lo tenga in un luogo adatto, evitando temperature elevate, raggi di sole diretti, umidità e polvere;
  - non usi l'apparecchio in modo continuativo per più di 30 minuti;
- 2 - Dopo ogni singola utilizzazione dell'apparecchio è buona norma provvedere ad una corretta pulizia degli accessori adoperati.  
E' sufficiente lavarli accuratamente con acqua corrente. Se desidera sterilizzarli, può sempre usare una soluzione a freddo consigliata dal Suo medico di fiducia.
- 3 - Le raccomandiamo di utilizzare ogni singola coppetta porta medicinale al massimo per 2 trattamenti, dopodiché provveda alla sua sostituzione.
- 4 - Le consigliamo vivamente di provvedere alla sostituzione del filtro dell'aria dopo 15/20 trattamenti o quando il suddetto filtro assume un colore grigiastro. Per effettuare la sostituzione basta che Lei:
  - estraiga il coperchio dallo scomparto situato sotto la base dell'apparecchio;
  - rimuova il vecchio filtro e ne inserisca uno nuovo;
  - rimetta il coperchio al suo posto;

#### DATI TECNICI

- 1 - Motore: metodo ultrasuoni
- 2 - Alimentazione: 230V 50Hz
- 3 - Peso: 425g
- 4 - Dimensioni: 164x97x140

Queste specifiche potranno essere modificate senza preavviso per migliorare le prestazioni dell'apparecchio.

#### SMALTIMENTO



#### ATTENZIONE : Avvertenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2002/96/CE, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l'ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.

#### GARANZIA

I termini della garanzia sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Accessori e cavi sono esclusi dalla garanzia. La garanzia è valida a patto che l'apparecchio non venga aperto né subisca colpi violenti o danneggiamenti intenzionali. Per avere diritto alla garanzia è necessario esibire l'originale della ricevuta di acquisto. La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto. In presenza dei requisiti, la garanzia si applica sostituendo l'apparecchio con un altro di tipo analogo. Alpien Italia spa non è responsabile di danni derivati da agenti esterni. Con riserva di errori e modifiche. Per qualsiasi informazione relativa alla garanzia telefonare al numero 199.193.328 (costo della chiamata Euro 0,1426 al minuto iva compresa da rete fissa) oppure consultare il sito [www.alpienitalia.it](http://www.alpienitalia.it)

Rev.1 e ultima modifica 01/01/2010

Importato e distribuito da:

Alpien Italia SpA - Via Cancelliera, 60 - 00040 Ariccia (Roma) Italy

Mandatario CE:

Com s.n.c.

Bremed Italy Division - Via Valle Inferiore, 31 - 06059 Todi (PG) Italy